

# 新製品 「息マジラック」のご紹介


株式会社エスケー

◇不織布マスク専用のインナーフレームです。

この製品をマスクの内側に取り付けることで、マスクが立体的になり、呼吸が楽にできるようになります。




◇ X型をした厚さ1mm程度の樹脂製品で、四隅にそれぞれS字フックを2個ずつ設けています。

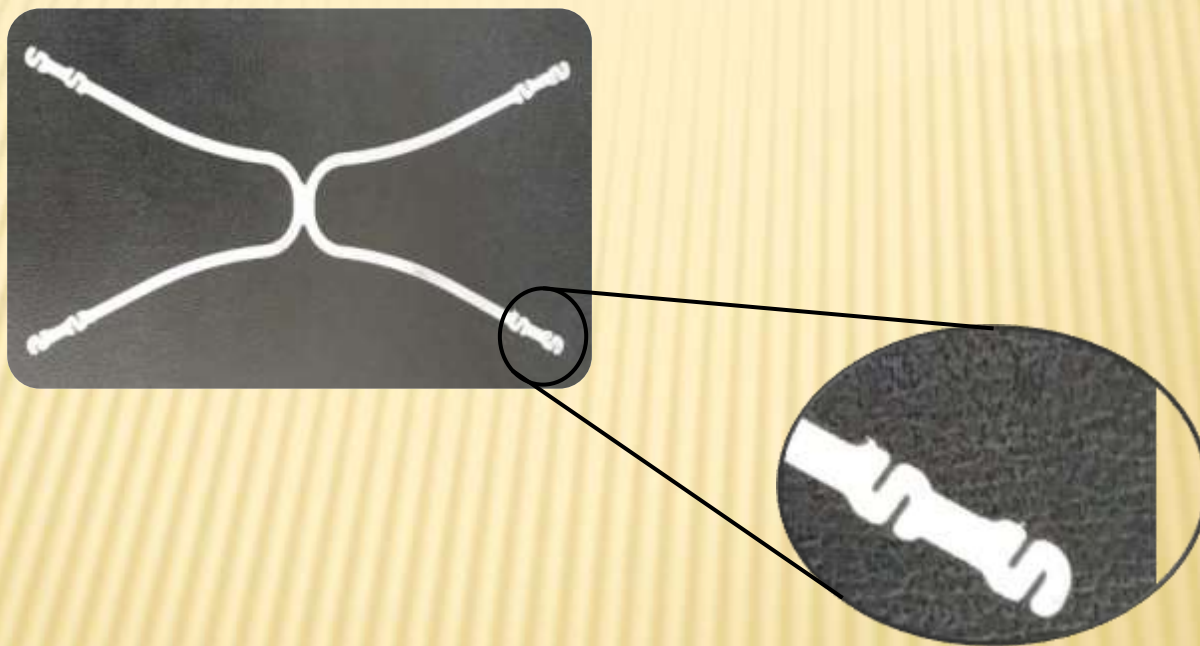

# マスクへの取り付け方

◇①～④の手順で取り付けます。

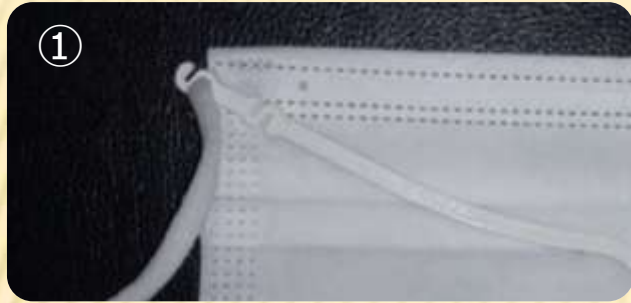

①②S字フックにマスクのゴム紐を通す。  
(ゴム紐の付け根に取り付ける。)



③4カ所すべてにS字フックを取り付ける。




④マスクのプリーツを開きアーチ状になっている製品を反対側に押し込む。

- ◇小さいサイズのマスクに使用する場合は、赤線の部分を4カ所はさみでカットして使用できます。

普通サイズのマスク用

小さいサイズのマスク用

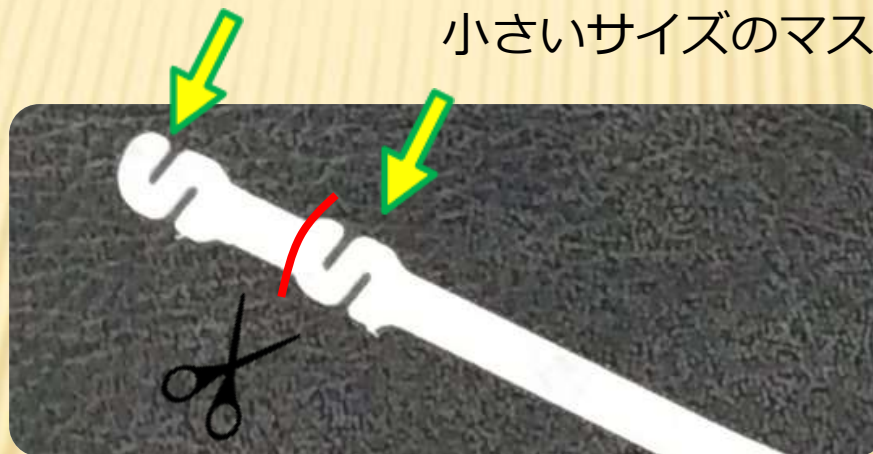

# 装着後の比較

未装着



装着あり



## 特長1

### 装着感が良い

違和感なく使用でき、長時間の使用による蒸れや臭いも軽減します。

## 特長2

### 呼吸や会話が楽

マスクのプリーツが開き、マスクの表面積が広がるため、呼吸や会話が楽になります。

## 特長3

### 化粧崩れ予防

肌とマスクの接触が減り、リップや口紅が付きにくく、肌荒れ予防にもなります。

## 特長4

### 熱中症の予防

マスクの中に熱がこもりにくくなります。

## 特長5

### ずれにくい

重さはわずか1.8g。  
非常に軽いため、ずれにくく  
快適に使用できます。

## 特長6

### 抗菌素材

製品は安心の日本製。  
抗菌素材のため、水で洗って  
繰り返し使用できます。

## 特長7


### 折りたためる

マスクごと折りたためて、  
ポケットにしまうことが  
できます。





## ◇コロナ禍で急激に膨らんだマスクの販売

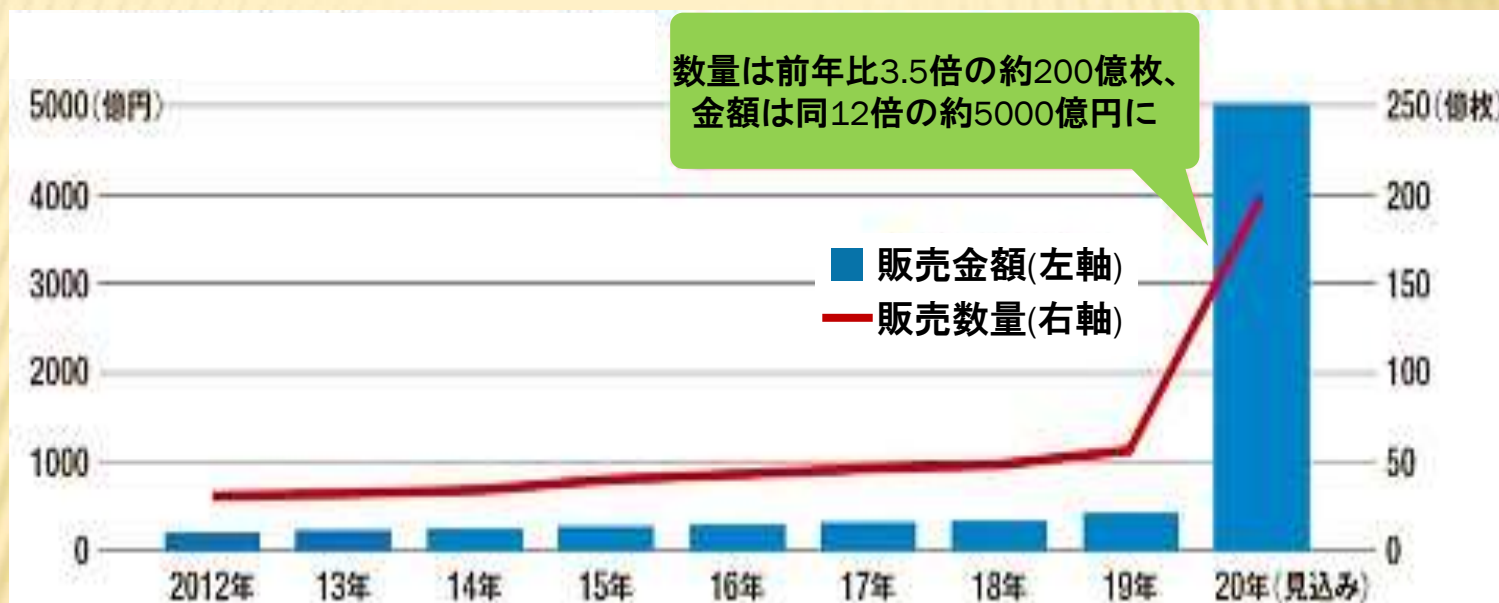

コロナウイルスの感染拡大


# 不織布マスクの重要性

### マスク素材別の効果比較


スーパーコンピューター「富岳」によるシミュレーション結果

対策方法	マスクなし	不織布マスク	布マスク	ウレタンマスク
吐き出し飛沫量	0% カット	80% カット	66~82% カット	50% カット
吸い込み飛沫量	0% カット	70% カット	35~45% カット	30~40% カット

ウレタンや布マスクよりも **不織布でできたマスクの方が飛沫を防ぐ効果が高い** 傾向があることがわかります。

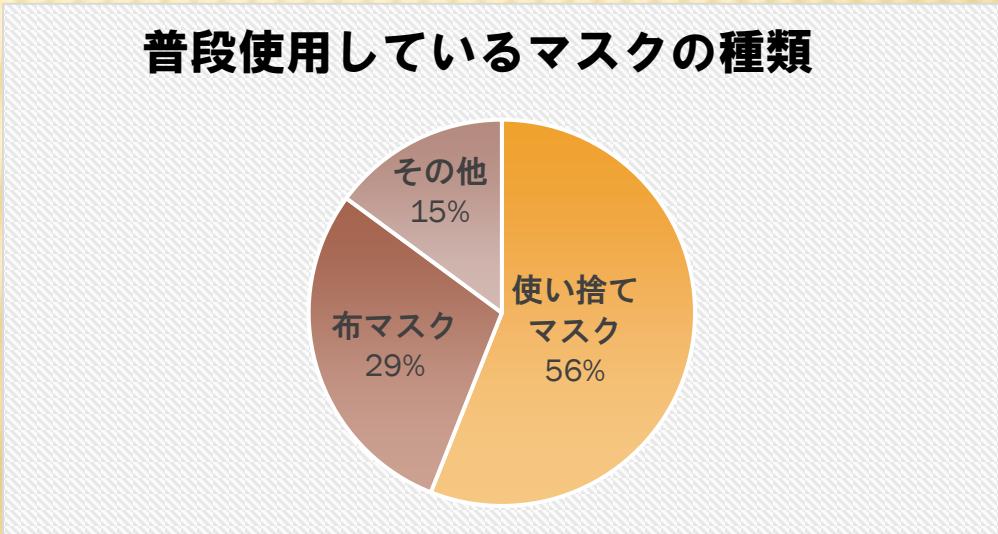

# 外出時にマスクをすると気になること

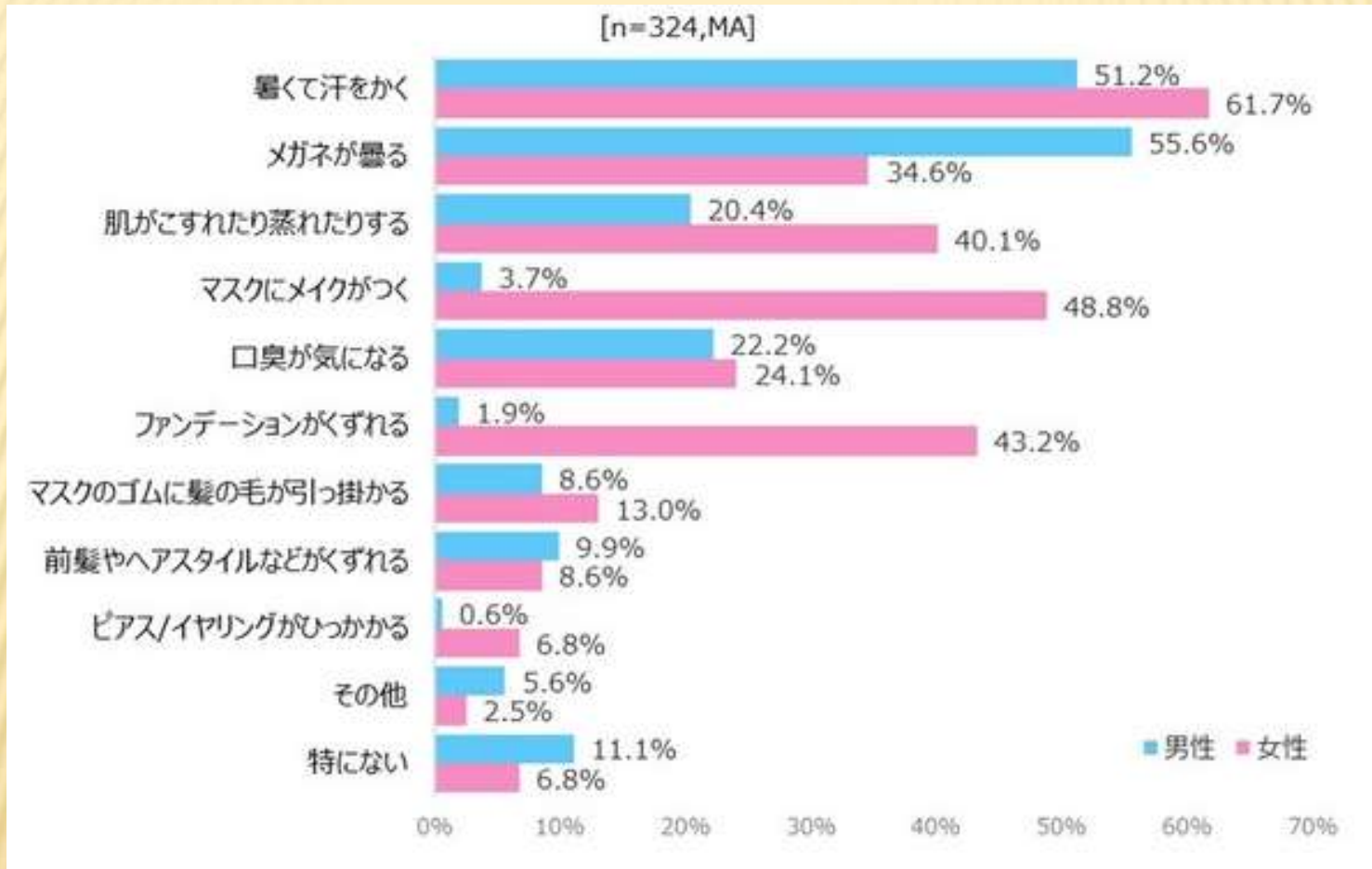



希望小売価格	396円（税込み）
袋単位の入数	2個入り
JAN	4580710830013
カートン単位の入数	100袋入り
I T F	14580710830010



↑製品紹介動画



株式会社工スケー  
岡山県総社市富原 5 6 - 1  
Tel:0866-93-8433  
Fax:0866-93-9823